

## IMPORTANT

- la salive ne contient pas d'ADN : il est impératif de bien frotter l'intérieur de la joue pour obtenir des fragments de tissus
- l'animal ne doit pas avoir mangé ou bu depuis au moins une demi-heure
- le prélèvement doit être authentifié par un vétérinaire
- ***l'analyse génétique demandée sera réalisée uniquement si le certificat de prélèvement est complet et si le règlement est joint au prélèvement***

## RECHERCHE / si le prélèvement est réalisé dans le cadre d'un programme de recherche :

- aucune contribution financière n'est demandée
- seul un brossage intensif de la muqueuse buccale permettra d'exploiter le prélèvement
- suivre les instructions mentionnées sur le formulaire spécifique (pour plus d'informations, se reporter à [www.antagene.com/chien](http://www.antagene.com/chien))

## MATERIEL NECESSAIRE

- un certificat de prélèvement « ANTAGENE » (téléchargeable sur [www.antagene.com](http://www.antagene.com))
- un écouvillon (cytobrush) et un tube contenant de l'éthanol 90°

## 1 Remplir le certificat de prélèvement

avec les informations suivantes :

- **le n° de tube**
- **les références de l'animal** : n° d'identification obligatoire
- **l'analyse génétique demandée** (au dos du certificat)
- les coordonnées du propriétaire
- les coordonnées du vétérinaire



## 2 Effectuer le prélèvement

- glisser l'écouvillon entre la gencive supérieure et la joue
- appuyer avec le pouce et tourner l'écouvillon pendant 20 secondes
- à défaut brosser fermement l'intérieur de la joue en tournant l'écouvillon pendant 20 secondes
- casser ou couper la tige à 1 cm (maximum) de l'écouvillon et placer la brosse dans le tube
- bien refermer le tube et le placer dans le sachet (ou le protéger pour le transport postal)

## 3 Expédier le prélèvement

Placer dans l'enveloppe (demi A4) :

- le sachet contenant le tube (ou le tube protégé)
- le certificat de prélèvement rempli et signé
- le formulaire spécifique dans le cas d'un prélèvement pour la recherche
- **le chèque ou un justificatif de virement bancaire** (avec le bon de commande)
- affranchir au tarif en vigueur (service courrier normal)

## Règlement en euros

- par chèque (à l'ordre d'ANTAGENE)
- par carte bancaire
- par virement bancaire / Références à préciser : nom du propriétaire - analyse demandée - espèce - race  
Crédit Agricole Centre-Est (Ecully Centre - France)  
BIC (Bank Identification Code) : AGRIFRPP878  
IBAN (International Bank Account Number) :

Pays	Code banque	Code guichet	N° de compte	Clé
FR76	17806	00686	748 664 94000	13