

Mode d'emploi

Des conditions d'hygiène strictes sont à respecter afin d'éviter des contaminations entre individus.

Authentification du prélèvement : le rôle du vétérinaire

- Il vérifie l'identifiant de l'animal (numéro de tatouage ou de transpondeur)
- Il reporte le n° du tube sur le certificat de prélèvement
- Il complète le certificat de prélèvement et appose son tampon, sa signature et la date du prélèvement



Réalisation du frottis buccal

- 1 L'animal ne doit pas avoir bu ou mangé depuis 30 minutes
- 2 Glisser la cytobrosse (écouvillon stérile) entre la gencive et la joue de l'animal
- 3 Appuyer avec le pouce et tourner fermement pendant 20 secondes
- 4 Mettre la cytobrosse dans le tube rempli d'alcool
- 5 Couper la cytobrosse avec des ciseaux au ras de la brosette afin de pouvoir refermer le tube sans forcer
- 6 En l'absence d'alcool dans le tube, compléter avec de l'éthanol 70° (ou alcool dénaturé)



Envoi du prélèvement

Mettre dans l'enveloppe de retour pré-adressée à ANTAGENE le prélèvement, le certificat et le règlement et affranchir l'enveloppe au tarif normal.

