

ISTRUZIONI PER L'USO

Per un riconoscimento ufficiale del risultato,
il veterinario autentica il prelievo

Autenticazione del prelievo: il ruolo del veterinario

- Verifica l'identificativo dell'animale (numero di tatuaggio o di transponder)
- Riporta il n° di provetta sul certificato di prelievo
- Appone il timbro, la firma e la data del prelievo

Effettuare el prelievo

- 1 Fill-in the sampling certificate and mark the tube number
- 2 L'animale non deve avere bevuto o mangiato da 30 minuti
- 3 Inserire il cito spazzolino (scovolino sterile) fra le gengiva e la guancia dell'animale
- 4 Premere con il pollice e ruotare fermamente per 20 secondi
- 5 Inserire il cito spazzolino nella provetta riempita d'alcol
- 6 Tagliare il cito spazzolino con forbici a livello della spazzola per poter richiudere la provetta con facilità.
- 7 Se manca alcol, completare con etanol a 70°
- 8 Inserire il prelievo, il certificato di prelievo e il pagamento (o il giustificativo) nella busta pre-indirizzata ad ANTAGENE

