

# Mode d'emploi

Pour une reconnaissance officielle du résultat,  
le vétérinaire authentifie le prélèvement

## Authentification du prélèvement : le rôle du vétérinaire

- Il vérifie l'identifiant de l'animal (numéro de tatouage ou de transpondeur)
- Il reporte le n° du tube sur le certificat de prélèvement
- Il appose son tampon, sa signature et la date du prélèvement

## Réalisation du frottis buccal

- 1 Remplir le certificat de prélèvement et y reporter le numéro du tube de prélèvement
- 2 L'animal ne doit pas avoir bu ou mangé depuis 30 minutes
- 3 Glisser la cytobrosse (écouvillon stérile) entre la gencive et la joue de l'animal
- 4 Appuyer avec le pouce et tourner fermement pendant 20 secondes
- 5 Mettre la cytobrosse dans le tube rempli d'alcool
- 6 Couper la cytobrosse avec des ciseaux au ras de la brosette afin de pouvoir refermer le tube sans forcer
- 7 En l'absence d'alcool dans le tube, compléter avec de l'éthanol 70° (ou alcool dénaturé)
- 8 Mettre dans l'enveloppe de retour pré-adressée à ANTAGENE le prélèvement, le certificat et le règlement (plus d'informations sur le [www.antagene.com](http://www.antagene.com), rubrique «commander»)
- 9 Affranchir l'enveloppe au tarif normal

